

Aflesen van het resultaat



Positief resultaat



Negatief resultaat



Ongeldig resultaat

Lees de meer gedetailleerde informatie in de voorgaande paragrafen.

- Indien u langer wacht dan 20 minuten, kunt u het resultaat niet meer op een betrouwbare wijze aflezen. Gooi daarom de test weg na het aflezen van het testresultaat binnen de juiste tijd, om verwarring te voorkomen.
- Uw sample is positief wanneer er binnen de aflees-tijd van 15 minuten 2 paarse lijnen verschijnen op

de cassette ("C" en "T"), ook wanneer de lijn bij de "T" licht gekleurd is. Een positief resultaat kan vaak voordat de 15 minuten afleestijd verstreken is, al worden afgelezen.

- Uw sample is negatief wanneer er alleen 1 paarse lijn bij de "C" verschijnt. Een negatief resultaat kan alleen aan het eind van de 15 minuten afleestijd afgelezen worden.
- Uw sample is ongeldig wanneer er geen lijn bij de "C" verschijnt, of wanneer er **alleen** een lijn bij de "T" verschijnt, of het gehele testveld paars kleurt.
- Mogelijke oorzaken van een ongeldig resultaat zijn een beschadigde verpakking of wattenstaafje, het verkeerd bewaren van de test of een fout in de uitvoering. Bewaar alle testonderdelen en neem contact op met de fabrikant (CARE diagnostica: mail@care.co.at).

Wat moet ik doen bij een positief resultaat?

Raadpleeg uw huisarts om het resultaat te bespreken. Neem deze bijsluiter mee zodat uw huisarts goed op de hoogte is van de test die u hebt uitgevoerd.

Wat moet ik doen bij een negatief resultaat?

Een negatief resultaat betekent dat u zeer waarschijnlijk geen chlamydia-infectie hebt. Bij aanhoudende klachten raden wij u aan nogmaals te testen of uw huisarts te bezoeken.

Wat moet ik doen bij een ongeldig resultaat?

Neem contact op met de fabrikant (CARE diagnostica: mail@care.co.at).



• Volg de bijsluiter goed op!



• Houd de test buiten bereik van kinderen.

• Gebruik de test niet nadat de houdbaarheidsdatum is overschreden.



• Bewaren bij een temperatuur van 4-28°C (39-82°F).



• Alle componenten zijn voor eenmalig gebruik.

• Bewaar de cassette niet apart.

• Uitsluitend voor extern gebruik.

• In-vitro diagnosticum voor zelfgebruik.

• Vloeistof A is bijtend voordat het met vloeistof B is gemixt.



CARE diagnostica Produktions- und Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf Austria



Wattenstaafje  

Puritan Medical Products Co.

31 School Street, Guilford

USA

Distributie in Nederland door:

OTC Medical BV

*patent pending

Art.: ZANL0016-NL Rev00 2009-12-10



TEST-POINT

INHOUD:

1 BIJSLUITER, WATTENSTAAFJE, FLESJE A, BUFFER FLESJE B, TEST EN EEN ZAKJE DROOGMIDDEL.



EXTRA NODIG VOOR DE TEST:

- EEN KLOK, WEKKER OF STOPWATCH OM DE TIJD OP TE NEMEN



KIJK VOOR DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP:
WWW.TEST-POINT.NL

CHLAMYDIA THUISTEST

HEEFT U VRAGEN?
INFO@TEST-POINT.NL

ZODRA DE TEST IS UITGEVOERD, KAN MEN ALLE
GEBRUIKTE SPULLEN WEGDOEN BIJ HET HUISAFVAL.

BIJSLUITER VERSIE: 2009 - 12 V1



CHLAMYDIA THUISTEST BIJSLUITER

- RESULTAAT BINNEN 15 MINUTEN
- GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
- ONBEHANDELD KAN CHLAMYDIA LEIDEN TOT ONVRUCHTBAARHEID OF INFECTIES VAN DE BAARMOEDER

LEES DE BIJSLUITER EERST HELEMAAL GOED
DOOR VOORDAT JE DE TEST GAAT UITVOEREN.



TEST-POINT

BIJSLUITER CHLAMYDIA THUISTEST

Informatie:

Deze test detecteert chlamydia. Chlamydia is de meest voorkomende SOA (seksueel overdraagbare aandoening). Alleen in Duitsland zijn er naar schatting al 300.000 tot 500.000 nieuwe infecties van chlamydia per jaar. Besmetting komt het meest voor bij jongere volwassenen (in de leeftijd van 15-25 jaar), diegenen die vaak van seksuele partner wisselen, de seksuele partners van diegenen die besmet zijn (ook diegenen die de symptomen niet hebben en niet weten dat ze besmet zijn) en baby's van besmette moeders. Infecties zonder seksueel contact (bijvoorbeeld in zwembaden) zijn zeldzaam, maar niet onmogelijk.

Chlamydia-infecties hebben vaak geen symptomen. Maar ze kunnen evengoed leiden tot ooginfecties, artritis en urineweginfecties. Daarbij leidt onbehandelde chlamydia vaak tot onvruchtbaarheid, een verhoogd risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en vroeggeboorten. In ontwikkelingslanden is chlamydia-infectie de meest voorkomende oorzaak van blindheid bij pasgeboren baby's.

Het is zeer belangrijk chlamydia te behandelen bij zwangerschap. Ongeveer 50% van besmette moeders dragen de infectie over op de kinderen. Veel voorkomende complicaties zijn daardoor conjunctivitis en pneumonia.

Deze test is geschikt voor het nemen van een sample vanuit de baarmoederhals, en is derhalve uitsluitend geschikt voor vrouwen. In het geval van een infectie, is het aanbevolen dat uw seksuele partner ook een test afneemt en eventueel een behandeling ondergaat.

Let op:

- Deze test is niet geschikt voor gebruik gedurende de zwangerschap.
- Gebruik deze test niet tijdens de menstruatie en de drie dagen na het einde van uw menstruatie, of wanneer u een urineweg infectie hebt!
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde wattenstaafje, en controleer of de verpakking onbeschadigd is.

Belangrijke aanwijzingen:

- Neem geen ingrijpende medische beslissingen zonder uw huisarts te raadplegen!
- Na gebruik kunt u alle componenten bij het reguliere huisafval wegdoen.
- Die onderdelen van het testmateriaal van veterinaire oorsprong (bijv. de antilichamen) zijn potentieel infectueus, maar leveren geen enkel risico zolang u de aanwijzingen uit de bijsluiters opvolgt. Was uit voorzorg uw handen nadat u de test hebt uitgevoerd.

In vergelijking met de PCR methode, in een klinische prestatie-evaluatie met 596 participanten, behaalde deze test een diagnostische sensitiviteit van 85,7% en een diagnostische specificiteit van 98,3%. Een lekenstudie werd onder 56 participanten afgenomen. Van deze 56 interpreteerden 54 het resultaat correct.


Voorbereiden voor de test

Test onderdelen: bijsluiters sample flesje A (rode dop), buffer flesje B (witte dop). Wattenstaafje en verpakking met testcassette en zakje droogmiddel. Zorg voor een klok of stopwatch. Houd de verpakking om de test in eerste instantie ONGEOPEND, omdat u deze pas later nodig hebt.

Nemen van het sample met het wattenstaafje

Zorg ervoor dat u niet urineert gedurende het uur voordat u de test gaat uitvoeren, omdat er anders wellicht een ongeldig resultaat uit de test kan komen.

Voer de test uit op een locatie waar u ongestoord de test kunt uitvoeren. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Wanneer de verpakking beschadigd is, het wattenstaafje niet gebruiken en contact opnemen met de fabrikant (CARE diagnostica: mail@care.co.at).

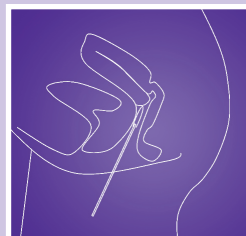

Afbeelding 1



Afbeelding 2

Neem een comfortabele positie in, zoals u voor het inbrengen van een tampon zou doen. Breng het wattenstaafje voorzichtig in de vagina tot aan de baarmoeder. Roteer het wattenstaafje gelijkmatig gedurende 30 seconden en haal het wattenstaafje langzaam terug.

Door de kleine hoeveelheid vloeistof in het sample flesje A, moet dit tot op de bodem geschud worden (als bij een thermometer). U kunt het flesje ook op een platte ondergrond zetten, er 5 maal lichtjes tegenaan tikken en dan rechtop laten staan.



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Uitvoeren van de test

Pak de verpakking met de test erbij. Binnen 15 minuten vanaf nu weet u de uitslag.



Afbeelding 5


Doop het wattenstaafje met het sample in het sample flesje A totdat het de bodem raakt. Roteer het wattenstaafje in de vloeistof en druk het een aantal maal tegen de zijkant van het flesje om het sample goed te mixen met de buffervloeistof.

Wacht 5 minuten. Het testresultaat kan beïnvloed worden wanneer u langer of korter wacht. Gedurende de wachttijd moet het wattenstaafje in het flesje blijven.

Plaats 6 druppels van het kleine buffer flesje B in het grote sample flesje A. Roer de oplossing een aantal maal met het wattenstaafje, en druk het nogmaals stevig tegen de zijkant van het flesje. Het wattenstaafje mag nu bij het reguliere huisafval.



Afbeelding 6

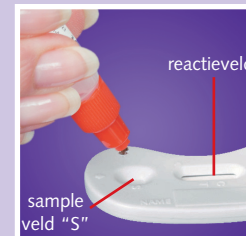

Afbeelding 7



Afbeelding 8

Sluit het sample flesje A en schud het nog eenmaal met beleid. Houd het sample flesje A met de dop naar boven vast en haal het dopje er vanaf.

Plaats nu 2 druppels vloeistof op het sample veld "S" op de cassette. Zorg ervoor dat er geen vloeistof direct op het reactieveld terecht komt.

Wacht nu 15 minuten. Indien u langer wacht dan 20 minuten is het niet langer mogelijk om het resultaat op een betrouwbare wijze af te lezen.